

# TENS eco 2

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE

**Le leader en  
anti-douleur**



- P1 Gate control 100 Hz
- P2 Gate control 80 Hz
- P3 Endorphinique 2 Hz
- P4 Gate control (Canal 1 : 100 Hz)  
+ Endorphinique (Canal 2 : 2 Hz)
- P5 TENS séquentiel : 10 min Gate control  
100 Hz + 20 min Endorphinique 2 Hz
- P6 Stimulation HAN : 100 Hz + 2 Hz  
alterné toutes les 3 secondes
- P7 TENS Burst 2 Hz
- P8 TENS Modulation 2 à 80 Hz
- P9 Excito-moteur
- P10 Gate control 80 Hz dynamic lent (Massage)
- P11 Gate control 80 Hz dynamic rapide (Frottements)
- P12 TENS haute fréquence
- U1 Traitement facial 80 Hz - 60µs  
(Traitement des zones sensibles cutanées)
- U2 Traitement des nausées 10 Hz - 180µs
- U3 Stimulation du nerf Vague 25 Hz
- U4 Stimulation du nerf Vague 10 Hz
- U5 Stimulation du nerf Vague 1 Hz



Distribué par **schwa-medico**  
FRANCE

**CE 0197**



**Monath-Electronic**

30, rue du Maréchal Joffre · 68250 Rouffach-FRANCE  
Tél. 03 89 49 73 61 · Fax : 03 89 49 72 43




# TENS eco 2



## MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE

Avant la mise en marche, relier les câbles à la machine ainsi qu'aux électrodes (toujours 2 électrodes par câble) puis coller les électrodes sur la peau.

### 1 Mise en marche/arrêt

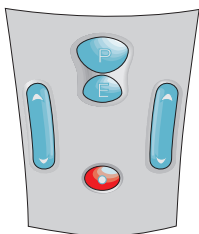

### 2 Choix du programme

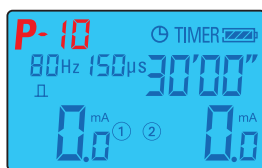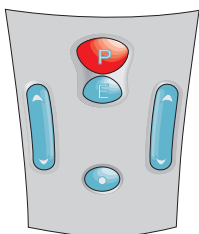


Appuyer sur la touche «P» pour choisir le programme souhaité

### 3 Réglage des intensités

Intensité canal 1

Pour monter

Pour baisser

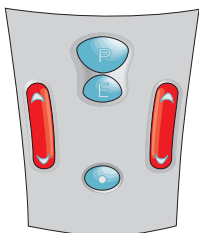

Intensité canal 2



Pour monter

Pour baisser



**Attention :** Verrouillage automatique des intensités. Pour déverrouiller baisser l'intensité puis remonter au niveau souhaité

### 4 Stopper la stimulation

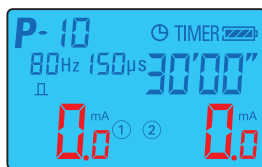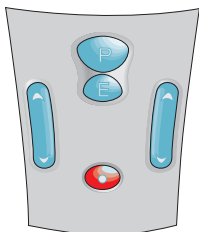

Pour stopper maintenir la touche «●» enfoncée pendant 2 secondes