


Electrode auriculaire bouchon

pour stimulation du nerf vague

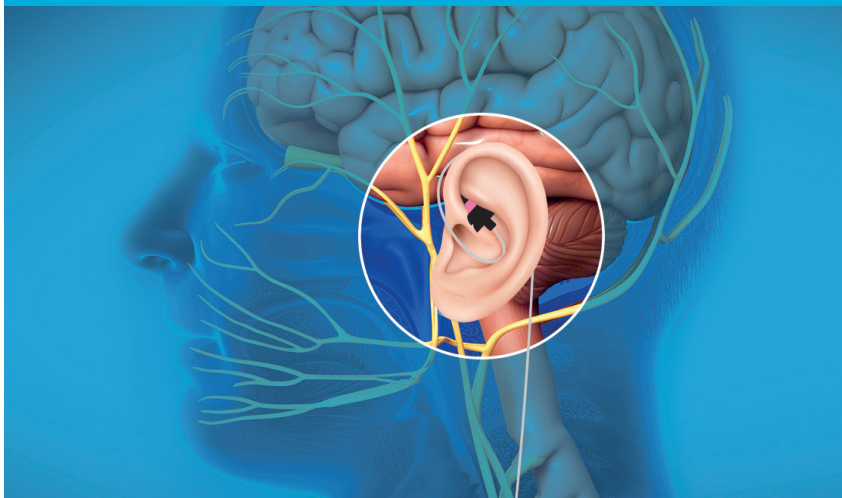


3DTS

**MODE D'EMPLOI et
GUIDE D'UTILISATION**
Brochure d'information

NÉCESSAIRE POUR DÉMARRER :

- 1 électrode auriculaire (Réf. : 101013)

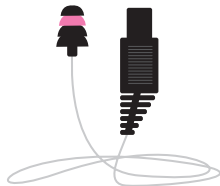

- 1 neurostimulateur
TENS Eco 2, UROstim 2, TENS Eco Plus ou TENS Ecomodyn




- 1 spray conducteur (Réf. : 251006)



INDICATIONS :

L'électrode auriculaire est un dispositif médical de classe I conçu pour la stimulation auriculaire du nerf vague par la cyma concha dans l'oreille gauche. N'utiliser cette électrode en aucun autre cas.

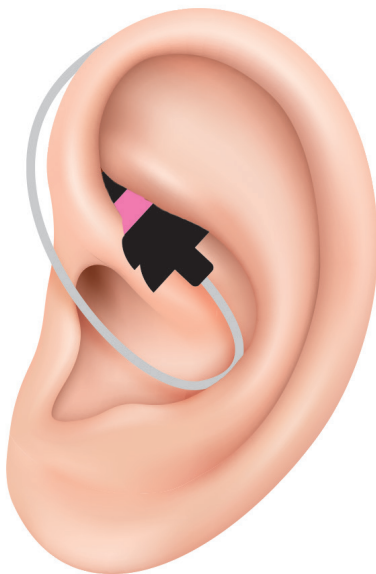

PRINCIPALES INDICATIONS POUVANT ÊTRE TRAITÉES PAR STIMULATION ÉLECTRIQUE DU NERF VAGUE :

- Syndrome de l'Intestin Irritable (SII)
 - Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI)
 - Douleurs viscérales et pelviennes
 - Troubles digestifs
 - Fibromyalgie
 - Migraine
 - Algie vasculaire de la face
-
- Les protocoles de stimulation (paramètres de stimulation, durée et fréquence des séances) sont propres à chaque indication. La durée d'une séance est généralement de 20 à 30 minutes, une à deux fois par jour.
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser l'électrode nerf-vague.

CONTRE-INDICATIONS DE LA tVNS :

En plus des contre-indications habituelles de la neurostimulation TENS indiquées dans le mode d'emploi du neurostimulateur, l'utilisation de la stimulation du nerf vague est aussi contre indiquée dans les cas suivants :

- Femme enceinte
- Pathologies cardiaques avérées
- Pathologies auriculaires

EFFETS INDÉSIRABLES ET RISQUE À L'UTILISATION :

Il est recommandé d'arrêter d'utiliser la thérapie et de consulter votre médecin si des effets indésirables importants surviennent lors de la stimulation auriculaire du nerf vague.

- Une irritation cutanée transitoire de la zone stimulée peut parfois apparaître après utilisation régulière de la thérapie. C'est pourquoi, il est nécessaire de respecter la durée et la fréquence des séances de stimulation recommandées par votre médecin prescripteur.
- L'utilisateur doit régler l'intensité de stimulation afin d'éviter une stimulation désagréable voire douloureuse.
- Tout incident grave survenu en lien avec l'électrode auriculaire doit faire l'objet d'une notification au fabricant ainsi qu'à l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

CONSOMMABLES :

L'électrode auriculaire de type bouchon est un consommable. Il s'agit d'une électrode de test qui a une durée de vie limitée à une utilisation pour 15 à 20 séances. Il est recommandé de ne pas plier ou tordre le câble afin d'éviter de l'endommager de façon précoce. Cette électrode permet de tester la réponse à la stimulation du nerf vague et l'impact potentiel sur les symptômes de l'utilisateur.

Pour une utilisation à long terme de la thérapie, il est recommandé d'utiliser l'électrode auriculaire 3DTS (Réf.101136).

Cependant, si l'utilisateur souhaite continuer la thérapie avec une électrode de type bouchon, il peut s'en procurer à tout moment auprès de son revendeur habituel.

NETTOYAGE :

Un nettoyage du bouchon de l'électrode auriculaire peut être réalisé à l'aide d'un mouchoir ou tissu sec et de manière délicate afin d'éviter tout endommagement.

FRÉQUENCE :

Réaliser des séances de stimulation strictement selon la durée et la fréquence journalière indiquées par le médecin prescripteur. Ne pas se stimuler davantage.

DÉMARRER UNE SÉANCE :

- **Humidifier l'électrode auriculaire** (Réf. : 101013) avec le **spray conducteur** TENS (Réf. : 251006)
- Positionner l'électrode auriculaire dans la zone de la cymba conchae de l'**oreille gauche** (voir photo en page 2).
Ne pas positionner l'électrode dans le conduit auriculaire.
- Relier le câble de l'électrode auriculaire à l'appareil sur le canal de gauche (canal 1) puis commencer la stimulation.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Augmenter l'intensité jusqu'à ressentir des fourmillements. L'intensité ressentie ne doit jamais être désagréable mais toujours rester confortable.



ÉLECTRODE AURICULAIRE (Réf. 101013)



Monath Electronic
30, rue du Maréchal Joffre
68250 - Rouffach, France

3DTS

CE

V08 - 15/10/2024 - REF : 13ME
© 2024 Schwa Medico France SAS