

# UROSTIM WIRELESS

RECHARGEMENT DES BATTERIES

## 1 Préparation de la station de charge

Positionnez le module « Batterie » dans la fente de charge de la station de charge.

Module « Batterie »




Module « Stimulateur »



## 2 Chargement de la batterie

Branchez la station de charge sur le secteur à l'aide du câble de raccordement fourni. Un témoin lumineux confirme que la station de charge est bien sous tension. Une diode orange continue confirme que la batterie est bien en cours de chargement. Une diode verte continue confirme que la charge de la batterie est terminée. Vous pouvez alors retirer la batterie et débrancher la station de charge.

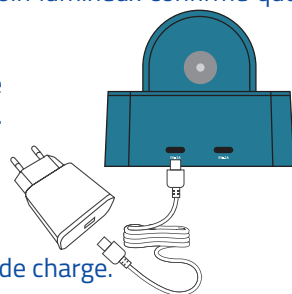


### REMARQUE :

Si durant la phase de charge, la batterie n'est pas bien enfoncée dans sa fiche de charge, la diode reste verte également parce que la batterie n'est pas reconnue.

## 3 Chargement de la télécommande

Le chargement de la télécommande s'effectue en reliant la télécommande à la station de charge à l'aide du cordon USB-C fourni, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Quand la télécommande est en charge, l'écran indique l'avancement du niveau de charge.

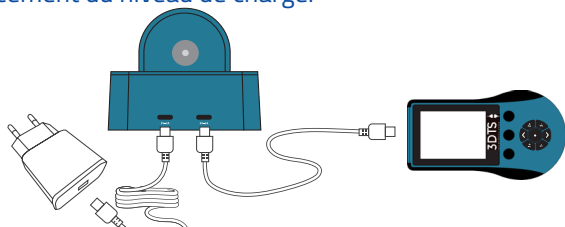

# UROSTIM WIRELESS

MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ

## L'UROSTIM 2 sans fil

- U1 Troubles urinaires 15 Hz
- U3 Troubles urinaires et anorectaux 10 Hz
- U5 Douleurs pelvi-périnéales
- U9 Troubles anorectaux et urinaires 10 Hz
- U11 Troubles urinaires 20 Hz



## PLACEMENT DES ELECTRODES

Pour une stimulation transcutanée du nerf tibial postérieur, placez la première électrode à l'**arrière de la malléole interne**, puis placez la seconde électrode 10 à 15 cm plus haut.



Choisissez le programme que vous a indiqué votre médecin. S'il ne vous a indiqué aucun programme à utiliser, choisissez par défaut le programme **U3** en utilisant la touche « P » pour la sélection du programme.



Distribué par **schwa-medico**  
FRANCE

CE 0197

 **Monath-Electronic**

30, rue du Maréchal Joffre · 68250 Rouffach-FRANCE  
Tél. 03 89 49 73 61 · Fax : 03 89 49 72 43

# UROSTIM WIRELESS

## MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ

**PRIMORDIAL** : Avant la mise en route de la télécommande, placez d'abord les électrodes sur la peau, reliez ensuite le module « Batterie » avec le module « Stimulateur » à l'aide du câble de liaison et connectez un module sur chaque électrode. Puis allumez le module « Stimulateur » en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton d'activation jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume.




### 1 Mise en marche/arrêt

Appuyer sur la touche centrale pour allumer l'appareil



### 2 Choix du programme

Appuyer sur la touche « P » pour choisir le programme souhaité

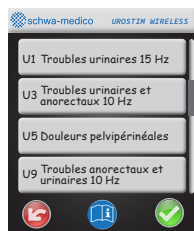

### 3 Navigation

Pour naviguer entre les différents programmes, utilisez les touches suivantes :



Pour monter / descendre dans la liste des programmes




Pour sélectionner un programme



Pour revenir à l'écran précédent (ou remonter dans l'arborescence)

### 4 Réglage des intensités

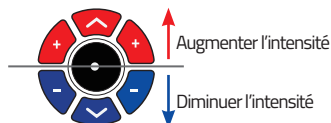

Augmenter l'intensité

Diminuer l'intensité



Pour augmenter ou réduire l'intensité

**Attention** : Verrouillage automatique de l'intensité après 10 secondes. Pour déverrouiller, baisser l'intensité d'un niveau.


### 5 Stopper la stimulation

Pour stopper la stimulation, appuyer sur la touche




# UROSTIM WIRELESS

## DEMARRAGE DU TUTORIEL

Après avoir démarré l'UROSTIM WIRELESS, appuyez sur la touche  afin de démarrer le tutoriel expliquant les différentes étapes de la mise en route de la thérapie.



L'écran s'affichera de cette façon et les images du tutoriel vont défiler automatiquement toutes les 7 secondes.

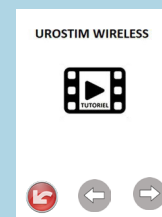

Vous pouvez à tout moment revenir à l'image précédente, avancer à l'image suivante ou bien sortir du tutoriel afin de commencer la stimulation.



Image précédente



Image suivante



Sortir du tutoriel pour commencer la stimulation

## Rechargement des batteries

### CONSULTEZ LA PAGE SUIVANTE

**POUR PLUS D'INFORMATIONS, LISEZ INTÉGRALEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER À UTILISER L'APPAREIL.**

Avant la première utilisation de l'appareil, pensez d'abord à bien charger totalement les batteries. Pour cela, lire la procédure page suivante.